

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

Solução Padrão de Urina

REF 2577

MS 80115310238



ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO MESMO.

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907-2534 / 0800 015 1414 / sac@kovalent.com.br

USO PRETENDIDO

A Solução Padrão de Urina EasyLyte é usada para avaliar a calibração do Analisador EasyLyte no MODO URINA (URINE MODE).

INSTRUÇÃO

Utilize a Solução Padrão de Urina no EasyLyte no MODO URINA (URINE MODE). O analisador estará considerado apto a operar satisfatoriamente se os valores abaixo forem obtidos:

Sódio: 155 – 165 mmol/L

Potássio: 58 – 62 mmol/L

Cloreto: 126 – 134 mmol/L

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

A Solução Padrão de Urina EasyLyte deve ser armazenada em local fresco e seco. A temperatura de armazenamento deve estar entre 4 e 25°C.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Cloreto de Sódio Cloreto de Potássio

Acetato de Sódio Água deionizada

APRESENTAÇÃO

Frasco com 50 mL

PRECAUÇÕES E AVISOS

A Solução Padrão de Urina EasyLyte não contém nenhum ingrediente ativo, portanto, não existem precauções a serem tomadas.

Descarte de acordo com as regulações locais.

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade da Solução Padrão de Urina EasyLyte é de 18 meses.

GARANTIA

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as informações nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

Símbolos Usados

	Fabricante
	Limites de temperatura
	Diagnóstico in vitro
	Cuidado, consulte documentos anexos
	Consulte instruções de uso
	Material Reciclável
	Não rejeitar diretamente para o ambiente
	Lote
	Data de Fabricação
	Validade
	Risco Biológico
	Altamente tóxico
	Corrosivo
	Nocivo

FABRICADO POR

Medica Corporation

5 Oak Park Drive
Bedford, Massachusetts 01730-1413 USA
Tel 781 275 4892
Fax 781 275 2731
www.medicacorp.com

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil
www.kovalent.com.br
CNPJ: 04.842.199/0001-56
Farm. Resp.: Jorge A. Janoni
CRF: 2648-RJ

SAC: sac@kovalent.com.br – (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

Data de vencimento e nº de lote: VIDE RÓTULO