

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro



SOLUÇÃO HEMOLISANTE

MS 80115310147



ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO MESMO.

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907 2534 / 0800 015 1414 / sac@kovalent.com.br

APRESENTAÇÃO

Artigo nº	Apresentação
4190500M	1 x 500 mL

FINALIDADE

Solução Hemolisante para determinação quantitativa *in vitro* da hemoglobina A1c (HbA1c) em sangue total em sistemas fotométricos.

SUMÁRIO

A Solução Hemolisante é usada para a preparação de amostras de sangue total, calibradores e controles para determinação da HbA1c com o kit HbA1c Kovalent.

COMPONENTES E CONCENTRAÇÕES DO REAGENTE

Água
Estabilizante.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

O reagente é estável até o final do mês indicado na data de validade, se armazenado à 2 – 25 °C e a contaminação for evitada. Não congelar o reagente.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Tome as precauções necessárias para o manuseio de reagentes de laboratório.

PREPARAÇÃO

O reagente está pronto para uso.

PROCEDIMENTO NO PREPARO DE AMOSTRAS

Solução Hemolisante: 1000µL
Amostra/Calibrador/Controle: 20µL
Misturar e deixar em repouso por 5 minutos ou até que uma hemólise completa seja evidente.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Seguir as disposições da resolução RDC N° 306/2004 sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

GARANTIA

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Símbolos Usados



Fabricante



Limites de temperatura



Diagnóstico in vitro



Cuidado, consulte documentos anexos



Consulte instruções de uso



Material Reciclável



Não rejeitar diretamente para o ambiente



Lote



Data de Fabricação



Validade



Risco Biológico



Altamente tóxico



Corrosivo



Nocivo

FABRICANTE

Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristóvão Sardenha, 110 – Jd. Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-714
www.kovalent.com.br
CNPJ: 04.842.199/0001-56
Farm. Resp.: Jorge A. Janoni
CRF: 2648-RJ

SAC: sac@kovalent.com.br - (21) 3907-2534 / 0800 015 1414
Data de Vencimento e N° de Lote: VIDE EMBALAGEM