

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico "in vitro"

KIT DE LIMPEZA PARA MÓDULO ISE MS/ANVISA 80115310175

Kit de solução de limpeza para lavagem diária

APRESENTAÇÃO:

Referência 5090090K	Apresentação 1x6 Frascos de Pepsina e 1x90mL Frasco de diluente
-------------------------------	---



Diluente 1x90mL
Composição: HCl (0.05 N) e NH₅F₂ (0.05N)



Pepsina 6 frascos
Composição: Pepsina (0,30g)



Irritante!

Irritante para os olhos e a pele. Evite o contato com a pele e com os olhos. Em caso de conta os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure assistência médica.

PREPARAÇÃO

1. Adicione o diluente no frasco de pepsina até encher o mesmo. Agite bem.
2. Registre a data desta diluição.
3. Quando não estiver em uso, coloque o frasco de Pepsina sob refrigeração 2 - 8°C.
4. A mistura é estável até 4 semanas. Após este prazo, descartar a mesma.



Para ver as definições dos símbolos utilizados nos rótulos do produto, consulte a seção Símbolos usados, no apêndice do manual do operador.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Símbolos Usados

-  Fabricante
-  Limites de temperatura
-  Diagnóstico in vitro
-  Cuidado, consulte documentos anexos
-  Consulte instruções de uso
-  Material Reciclável
-  Não rejeitar diretamente para o ambiente
-  Lote
-  Data de Fabricação
-  Validade
-  Risco Biológico

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-350
www.kovalent.com.br
CNPJ: 04.842.199/0001-56
Farm. Resp.: Jorge A. Janoni
CRF: 2648-RJ

SAC: 21 2623-1367 - sac@kovalent.com.br

Data de Vencimento e N^o de Lote: VIDE EMBALAGEM